

Weinmann
Geräte für Medizin
GmbH+Co.KG
Postfach 540268
22502 Hamburg
T: 040/5 47 02-0
F: 040/54 70 24 61
E: info@weinmann.de
www.weinmann.de

WM 16666c - 06.2011

Softstartzeit einstellen

Ihr Therapiegerät ist **eingeschaltet**



Softstart-Taste
3 Sekunden
gedrückt halten.

LCD-Anzeige blinkt. Gewünschte Softstartzeit
durch wiederholtes Drücken der Softstart-Taste
in 5-Minuten-Schritten einstellen.

Maximalzeit:
30 Minuten
Minimalzeit:
5 Minuten



Durch kurzes Drücken
der Softstart-Taste ist
jederzeit das Ein- bzw.
Ausschalten möglich.

Softstart ein

Softstart aus

Anmerkung: Der Softstart kann vom Arzt gesperrt werden.

Anfeuchterstufe einstellen

Ihr Therapiegerät ist **eingeschaltet**



Anfeuchter-Taste
3 Sekunden ge-
drückt halten.

LCD-Anzeige blinkt. Gewünschte
Anfeuchterstufe durch wiederholtes Drü-
cken der Anfeuchter-Taste einstellen.

Empfehlung 3
Maximalwert 6
Minimalwert 1



Durch kurzes Drücken
der Anfeuchter-Taste ist
jederzeit das Ein- bzw.
Ausschalten möglich.

Anfeuchter ein

Anfeuchter aus



**SOMNOvent ST mit
SOMNOclick 300**

Kurzgebrauchsanweisung



Nutzungszeit ablesen

Gerät ist **ausgeschaltet**



Ein-/Aus-Taste kurz drücken
Gesamt-Nutzungszeit erscheint für wenige Sekunden

Gerät ist **eingeschaltet**



Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden drücken
Nutzungszeit der letzten Anwendung (Datum, Dauer) erscheint für wenige Sek.

Schlauchsystem trocknen

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**



Beide Tasten gleichzeitig drücken.



Der Trocknungsvorgang setzt ein: 30 min bei 10 – 12 mbar



Mit Ein-/Aus-Taste ist jederzeit der Abbruch möglich.

Autostart an-/ausschalten

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**



Softstarttaste 3 Sekunden gedrückt halten.



Autostartanzeige erscheint

A 1 = Autostart an, A 0 = Autostart aus



Wechsel mit der Ein-/Aus-Taste

Feinfilterwechsel

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**

A
Feinfilterzähler ≥ 250 Stunden



Symbol »Filterwechsel« erscheint.
Feinfilter austauschen.



Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt halten:



Feinfilterzähler wird auf Null gesetzt.

B
Feinfilterzähler < 250 Stunden, Feinfilter ist verschmutzt.



Keine LCD-Anzeige, aber Feinfilter austauschen.



Ein-/Aus-Taste 6 Sekunden gedrückt halten:



- nach 3 Sekunden



- nach 6 Sekunden Feinfilterzähler ist auf Null gesetzt.

Wartung



Nach 5000 Stunden erscheint das Wartungssymbol.
Die Wartung sollte durch Weinmann oder einen autorisierten Fachhändler in nächster Zeit durchgeführt werden.